

この度は、弊社の『ころやわDIY』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しく安全にお使いいただき、転倒骨折リスクの低減にお役立ていただけますと幸いです。

特長

「ころやわDIY」は、普段は硬く、荷重がかかる時だけ凹んで衝撃を吸収する、転倒骨折リスクを低減するフロアマットです。

- ・簡単に取り付け、取り外しができます。
- ・スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
- ・フロアマット裏面の接着テープにより床に吸着します。
- ・カッターでカットいただけます。
- ・一般的な床暖房の上でもお使いいただけます。

製品サイズ




製品仕様

表面材: 塩ビ
裏面: TPO(熱可塑性エラストマー)


使用方法

STEP01

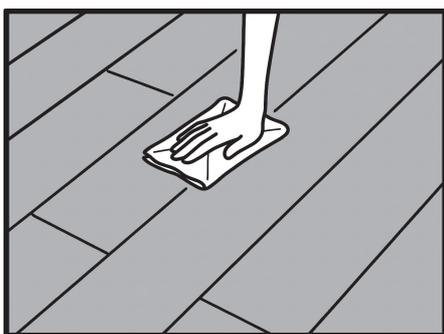

床のホコリ、水等をよく拭き取ってください。


STEP02

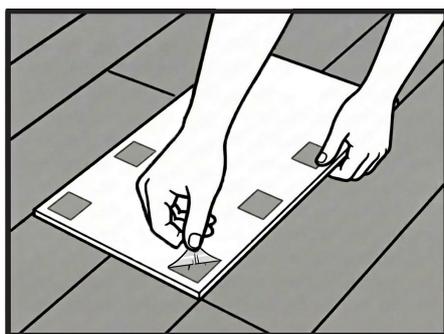

フロアマット裏面の剥離紙をはがしてください。

※テープ箇所はイラストと違う場合がございます

STEP03

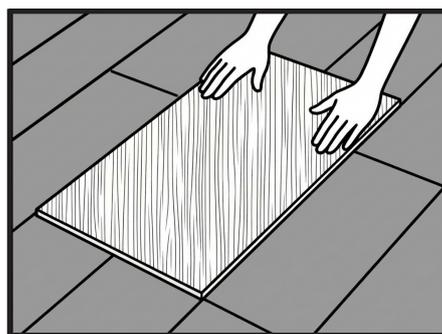

床面に吸着するようにフロアマットを手で押さえてください。

製品情報はこちらからご覧いただけます→

ホームページ【<https://www.magicshields.co.jp/diy/>】または右記QRコードからご確認いただけます。



⚠️ ご利用上の注意

本製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

ご利用について

- 畳や毛足の長い絨毯やカーペットの上でのご利用は、ご遠慮ください。
ご利用中に製品がずれたりして、思わぬケガにつながる可能性があります。
- 表面材を清掃される時は、ビニール床と同じく水拭きのほか、アルコール・次亜塩素酸ナトリウムがお使いいただけます。
- 表面材等が破れる可能性がありますので、先が尖ったものは置かないでください。
- 表面材の上に接触面積が狭く、重いものをのせると凹む場合があります。積載荷重は1 cm²あたり1.7kg となりますので、家具や椅子等で設置面積が狭いものを置いた際には凹みが生じる場合がございます。

お取り扱いについて

- 敷く前に必ず、床面への汚れや油分を拭き取ってください。
- カットする際は、怪我をしないよう十分に注意して作業を行なってください。
- 「ころやわDIY」の上で先が尖ったものや、鋭利な物のご使用はお止めください。「ころやわDIY」に穴が空いたり破れたりする恐れがあり、事故や怪我にもつながります。
- 製品の特性上、経年劣化により、伸び縮みや変形、破損する可能性があります。
- 紫外線により日焼け・変色する場合がございます。
- 素材の特性上、湿った衣類などに色移りする場合がありますので、十分ご注意ください。
- 火気に近づけたり、ストーブやコンロ等の高温となる場所では変形の原因にもなり危険ですので、十分ご注意ください。
- 温度や湿度など環境により「ころやわDIY」に反りが起きる場合がございますが、軽く逆側に反らすことである程度元に戻すことができます。
- 原料の特性上、石油製品特有の「臭い」を感じる場合がございますが品質に問題はございません。
気になる場合は、風通しの良い場所で陰干しいただくと臭いが除去できます。

お手入れ、保管について

- 水拭きした後は、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干しして、完全に乾いてから使用してください。
- 洗濯機等での洗濯はご遠慮ください。
- ※ 本製品は、自社開発製品のため、他社類似製品との互換性はございません。
- ※ 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- ※ 天災などの不可抗力や、お客様の不注意・改造による故障・破損に対する保証はいたしかねます。

製品に関するお問い合わせ

ご不明点がありましたら、株式会社Magic Shieldsまでお問い合わせください。

電話番号	050-1742-4800	受付時間	平日10時～17時	WEB問い合わせ 
E-mail	support@magicshields.co.jp			
WEB受付(24時間)	https://www.magicshields.co.jp/contact/			